

Att bandagera en enterokutan fistel med en utmanande hudstatus runt fisteln

Fallstudie inlämnad av:

Liesbeth Boerman, Stomiterapeut,
Meander Medical Centre, Amersfoort, Nederländerna


Patienthistorik:

- 52-årig patient.
- Omfattande medicinsk anamnes i form av Crohns sjukdom, kolit och ett antal kirurgiska ingrepp.
- Förekomst av fistlar efter explorativ laparotomi, adherenslösning, resektion av 80 cm tunntarm och revision av endileostomi.
- Patienten har endast 1 meter tunntarm kvar idag.
- Patientens läkare rekommenderade fasta med Total Parenteral Nutrition (TPN). Rekommendationen var dock inget alternativ för patienten som ville äta ordentligt för att bibehålla sin livskvalitet och leva ett så normalt liv som möjligt. Detta ökade volymen av vätska från patientens fistel, vilket i sin tur försvårade omläggningen av fisteln.



Vårdplan:


- Patienten har ett öppet buksår med två fistlar som båda har höga flöden.
- Fistelvätskan är aggressiv och fräter snabbt på sårförbanden.
- Såret drar inåt vilket gör att sårkanterna vinklas nedåt.
- Planen är att skapa en jämn yta för påsen genom att jämna ut de olika hudnivåerna runt fisteln och noga skydda den omgivande huden innan eakin® Sår- & Fistelpåse appliceras.

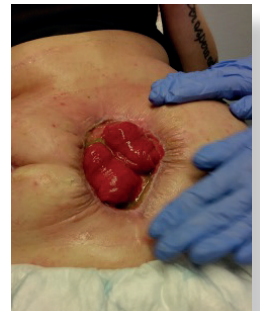


Tips på hur du applicerar en eakin® Sår- & Fistelpåse:

Skapa den perfekta mallen

- När mallen skapas är det viktigt att lägga till några extra millimeter runt såret för att säkerställa att påsen täcker såret.
- Om du behåller mallen för framtida appliceringar, se till att kontrollera mallens storlek på veckobasis eftersom sår läkning kan göra att sårets storlek minskar.
- Se till att mallen alltid är en spegelbild av formen på såret, och att orden "EAKIN WOUND POUCH" står spegelvänt.

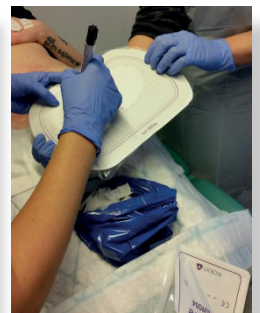

Skydda den omgivande huden runt fisteln från skadlig vätska

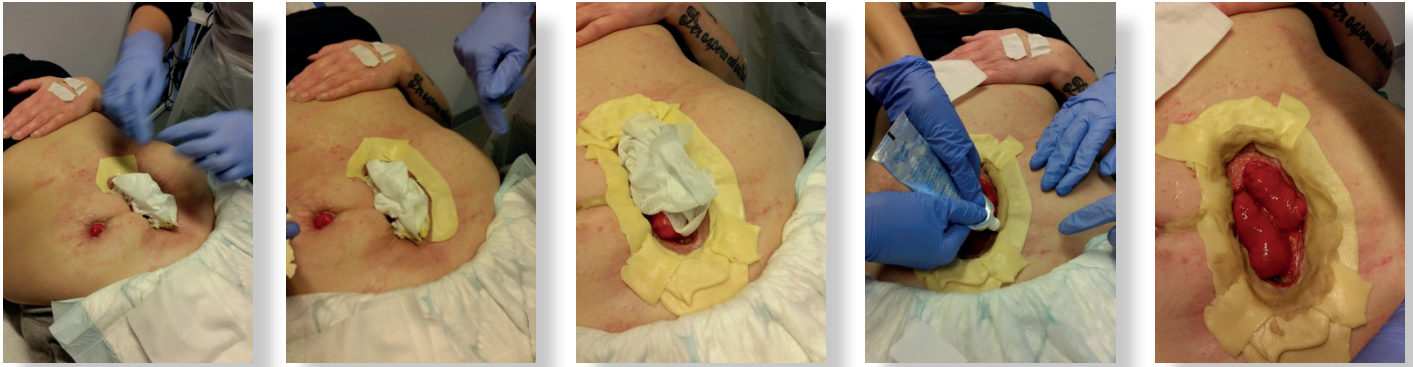

- Skydda den utsatta huden runt fisteln från skadliga vätskor med hjälp av remsor av eakin **Cohesive**® hudskyddsplattor eller eakin **Cohesive**® hudskyddsringar.
- Lägg flera lager av **Cohesive**® hudskydd runt fisteln om det behövs för att skapa en jämn yta för påsen.
- I detta fall har huden mellan såret och patientens ileostomi jämnats ut med hjälp av eakin pasta och eakin **Cohesive**® hudskydd.

Använd eakin® Lucka för direkt åtkomst till såret



- Värm basplattan på eakin® Sår- och Fistelpåse för att säkerställa maximal vidhäftning på patientens hud.
- I detta fall har en skära skurits från kanten av påsens basplatta för att passa bättre runt ileostomin.
- eakin® Lucka ger direkt åtkomst till såret. Pasta har använts för att tätat runt sårkanterna för att säkerställa att huden skyddas från frätande fistelvätska och därmed ytterligare öka påsens användningstid.
- När eakin® Lucka stängs är det viktigt att se till att det finns luft i påsen för att undvika att ett vakuum skapas.
- Använd eakin Release™ Häftborttagning för att underlätta borttagningen av eakin® Sår- & Fistelpåse.

Resultat:

- eakin® Sår- & Fistelpåse uppnådde en bäretid på 3 till 4 dagar utan läckage.
- Huden runt fisteln som skyddades av eakin Cohesive® Hudskydd förblev hel och oskadad
- Patienten var fortsatt trygg och bibehöll sin livskvalitet.

Produkter som användes:



XL eakin®
Sår- & Fistelpåse
839264



eakin **Cohesive**®
hudskyddsplattor
839004



eakin **Cohesive**®
hudskyddsringar
839002



eakin release™
Häftborttagningsservetter
839024