


FALLSTUDIE 3

eakin Sår & Fistelpåse dräneringslösningar möjliggör rörlighet.

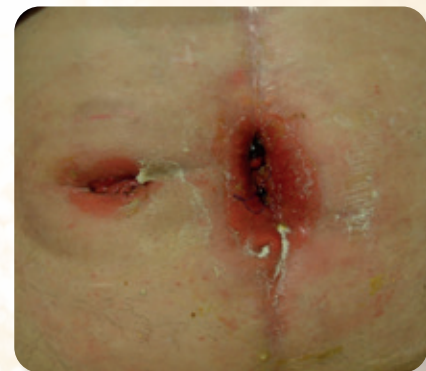

Bakgrund:

- 67-årig man.
- Högflödesstomi och fistel placerad i ett djupt hudveck.
- Okontrollerbara läckage orsakade stress hos patienten, hans fru och vårdteamet.
- Bunden till hemmet under 6 månader vilket resulterade i en dålig livskvalitet.

Vårdbakgrund:

Ett flertal vårdalternativ testades innan de hittade följande optimala vårdplan:

- Planerat påsbyte veckovis
- Stomi och fistlar fick tillsammans plats i en eakin Sår & Fistelpåse;
- eakin **Cohesive**[®] hudskyddsringar och eakin **Cohesive**[®] pasta användes för att fylla i veck och sprickor och på så sätt skapa en jämn appliceringsyta;
- Kanterna på basplattan tätades med pasta och kunde nås via eakin[®] Luckan;
- eakin Sår & Fistelpåse anslöts till en dräneringspåse vilket underlättade patientens rörlighet;
- Vårdteamet kontrollerade eakin Sår & Fistelpåse 2-3 gånger dagligen och tömde ut vätskan vid behov.

Livskvalitet och fördelar vid användning av eakin Sår & Fistelpåse:

Skötsel av stomi och fistlar **under kontroll** med eakin Sår & Fistelpåse.

Huden är inte längre röd eller öm i de två områdena.

Den **kontinuerliga dräneringen återställde patientens rörlighet**.

Nu kunde patienten **återvända** till en **aktiv livsstil**.

Hans **oro minskade** och hans **livskvalitet ökade avsevärt**.



Använd produkt:

839264 XL eakin Sår & Fistelpåse med eakin® Luckan

839010 eakin **Cohesive**® pasta

839005 eakin **Cohesive** SLIM®



Fallstudie inlämnad av:

Joliek Orth en Ilse Van Der Zanden,
Zuidzorg, Valkenswaard, Netherlands

NY

Video med appliceringsinstruktioner finns tillgänglig på www.eakin.eu/wound-care