

eakin Sår & Fistelpåsar™

**Ett värdigt sätt
att hantera en
ulcererande tumör.**

Fallstudie inlämnad av:

Elisa van de Ree, Community nurse
SVRZ ZorgThuis, The Netherlands



Bakgrund:

75-årig kvinna med tidigare diagnostiserad bröstcancer vilket resulterade i mastektomi år 2004 och efterföljande behandling med god effekt.

September 2018:

Ett sarkom diagnosticeras där mastektomin gjorts.

Palliativ diagnos med en prognos på 6 månaders överlevnad. Fokus på patientens komfort i livets slutskede.

Tumören förväntas växa och bli större. Patienten behandlas med strålbehandling i ett försök att få tumören att växa långsammare.

Läkaren informerar om att risken för blödning och sarkom i blodkärlen är hög.

Patienten vårdas hemma med hjälp av maken.

11 maj 2019



Maj 2019 - Augusti 2019:

Tumören växer snabbt och hemsjukvården börjar sköta patienten i hemmet.

I takt med att tumören växer blir det allt svårare att lägga om tumorsåret.

Hemsjukvården utökas och lägger nu om tumorsåret två gånger per dag.

Tumören fortsätter att utsöndra rikligt med vätska vilket leder till att förbanden snabbt blir mättade.

14 juni 2019



Förbandsbytet utökas till tre gånger per dag.

Hemsjukvården upplever att det är svårt att sköta omläggningarna på grund av den växande tumören, förband som lossnar samt hög risk för blödning. Patientens livskvalitet påverkas till det sämre.

13 augusti 2019



17 september 2019



September 2019:

Det är fortsatta problem med läckage vilket leder till att patienten ständigt lider av att ha blöta förband och lakan.


Förbandsbyte tre gånger dagligen orsakar både fysiska och psykiska obehag för patienten, hennes familj och vårdarna.

Lösning:

För att hitta en lämpligare produkt med längre bärbarhet och för att slippa obehagen, kontaktar hemsjukvården eakin® som rekommenderade en XL fistelpåse (839263).

De besöker kvinnan i hemmet och utbildar hemsjukvårdens personal i hur de ska bandagera detta utmanade sår med eakins fistelpåse™. Detta för att undvika så många störande moment som möjligt för denna sjuka patient.

Guide för att applicera en eakin Sår- och fistelpåse™:

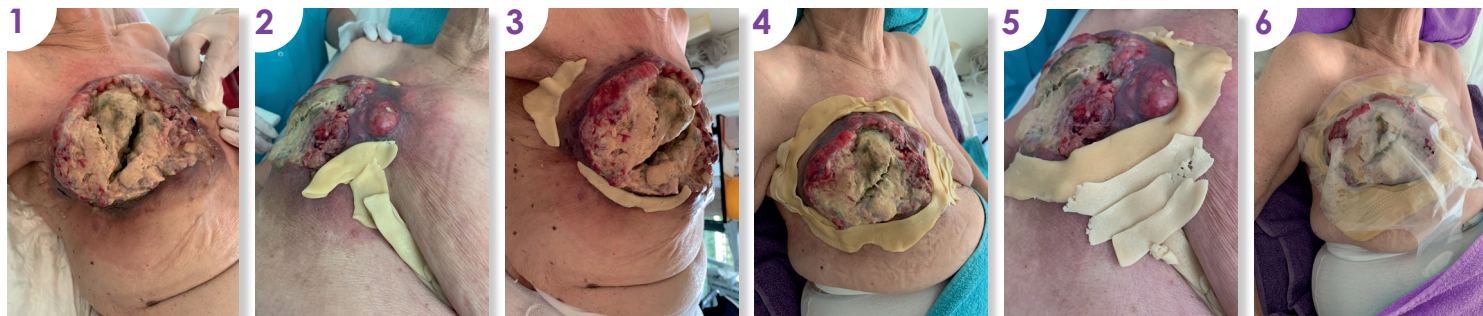

Använd eakin release™ remover för att ta bort eakinrester. Gör rent huden och låt den torka.

I det här fallet, för att inte låta något material gå till spillo, användes det urklippta eakinmaterialet från fistelpåsen tillsammans med eakin **Cohesive SLIMS®** för att fylla ut alla gropar och veck för att skapa en jämn yta.

Kom ihåg att ta bort den tunna plastfilmen när överblivet eakinmaterial från fistelpåsen används

Ta bort det vita skyddspappret och applicera runt såret. Tryck försiktigt för att påsen ska fastna ordentligt.

Resultat:

Då patienten tidigare fick utstå förbands-, kläd- och lakansbyte tre gånger per dag blev det en stor skillnad när vårdpersonalen övergick till att använda **eakin Sår- och fistelpåse™** som sitter **3-4 dagar utan att läcka**.

Hemsjukvården behövde inte längre byta förband flera gånger per dygn vilket innebar att **dom inte behövde störa den svårt sjuka kvinnan så mycket**.

eakin Sår- och fistelpåse™ kapslade in både obehaglig lukt och sårvätska väldigt bra, vilket avsevärt minskade antalet byten av kläder och sängkläder.

eakin Sår- och fistelpåse **ökade komforten** för patienten och bidrog till att **förbättra det känslomässiga välbefinnandet** hos både patienten och hennes man.

Slutsats:

Tyvärr försämrades kvinnan snabbt och hon gick bort på kvällen den 30 september 2019.

Hemsjukvården var väldigt nöjda med eakin Sår- och Fistelpåse™ och maken kommenterade att det hade varit en bra lösning för hustrun.



“

**eakin Sår- och Fistelpåsar™
gav patienten en stor trygghet i
sjukdomens slutskede.**

**Om vi inte hade haft denna lösningen
så hade vi varit tvungna att byta
förband, kläder och lakan så ofta
att det hade varit besvärligt för
patienten, hennes familj och för
hemsjukvården.**

**eakin Sår- och Fistelpåsar™ kapslade
också in den starka odören vilket var
bra för patientens självkänsla.**

Hemsjukvården

”

Produkter som användes



eakin Sår- och
fistelpåse™ XL
839263



eakin **Cohesive**
SLIMS®
839005



eakin **Cohesive**
StomaWrap™
839006



eakin release™
spray & servetter
839023 / 839024

Kontakt



046-29 24 00



kundservice@mcare.se | www.mcare.se