



DEN KOMPLETTA GUIDEN TILL FULLSTÄNDIG TRYGGHET



Recognising Salts research
into healthy stoma skin




DERMATOLOGICALLY
ACCREDITED



SKAPA TRYGGHET MED SALTS STOMA COLLAR

Salts Stoma Collar är en unik och innovativ stomikrage som bildar en läckagefri barriär vid stomins bas. Det är mycket viktigt att den passar perfekt, utan att vare sig sitta för löst eller för tajt.

Salts Stoma Collar hindrar påsens innehåll från att komma i kontakt med den känsliga huden runt stomin. Den kan också bidra till att utgöra ett stöd och forma stomin till en tydligare "knopp". Stomikragen kan användas i alla åldrar och på alla typer av stomier för att undvika röd, öm och irriterad hud.

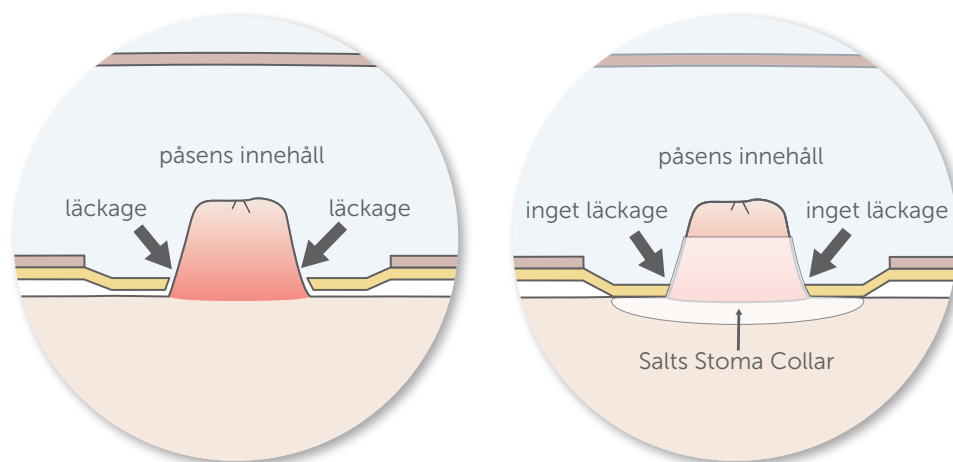

Läckage kan uppstå om
stomikragen inte används

Stomikragen bildar en
barriär för att undvika läckage

*Salts Stoma Collar hjälper stomiopererade med alla typer
av stomier att undvika röd, öm och irriterad hud.*

SKAPA TRYGGHET MED SALTS STOMA COLLAR

MJUK OCH FLEXIBEL KRAGE

Kragen på Salts Stoma Collar är mycket tunn och flexibel. Den följer kroppens alla rörelser, men är hela tiden mjukt omsluten runt stomin. Det är ingen risk att den stramar åt kring stomin.

HUDVÄNLIG PLATTA

Den mycket hudvänliga plattan har erkänts av British Skin Foundation och är dermatologiskt ackrediterad av Skin Health Alliance. Den passar alla, även de med ung, känslig och ömtålig hud.

EFFEKTIV OCH SKONSAM HÄFTA

Häftan på Salts Stoma Collar är effektiv, men samtidigt mycket mjuk och bekväm.

PERFEKT HÖJD OCH STORLEKAR


Höjd och storlekar har utvecklats tillsammans med stomiopererade. Om kragen är för hög går det utmärkt att klippa den till lämplig nivå.

Stomikragen är mycket mjuk och flexibel.

Den följer kroppens alla rörelser, men är hela tiden mjukt omsluten runt stomin.

FUNGERAR PÅ OVALA STOMIER

Salts Stoma Collar är så flexibel att den kan formas till att passa en oval stomi. Ta en storlek som är aningen större än stomin, men som ändå kan sluta tätt intill större delen av stomins bas, så att den kan förebygga läckage.

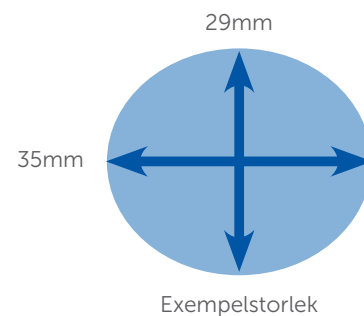

SALTS STOMA COLLAR PASSAR PÅ ALLA TYPER AV STOMIER

Salts Stoma Collar fungerar som en läckagesäker barriär vid stomins bas och kan användas av alla. Man kan tro att kragen bara passar stomier som är helt runda, men det stämmer inte. Den passar också stomier som är låga, långa eller ovala. Det har även visat sig att Salts Stoma Collar har varit en perfekt lösning för stomier som omges av gropar, veck eller bräck. Dessa ojämnheter kan behöva fyllas ut med stomipasta eller hudskyddsringar.


8 STORLEKAR

Rätt storlek på Salts Stoma Collar innebär att den kan fungera effektivt. Stomikragen är designad för att hindra påsens innehåll från att hamna på huden runt stomin.

Därför måste kragen sluta tätt intill stomin utan att sitta för tajt eller för löst.


Salts Stoma Collar finns i åtta olika storlekar.

Använd storleksguiden för att enkelt finna rätt storlek på kragen och uppnå perfekt passform.

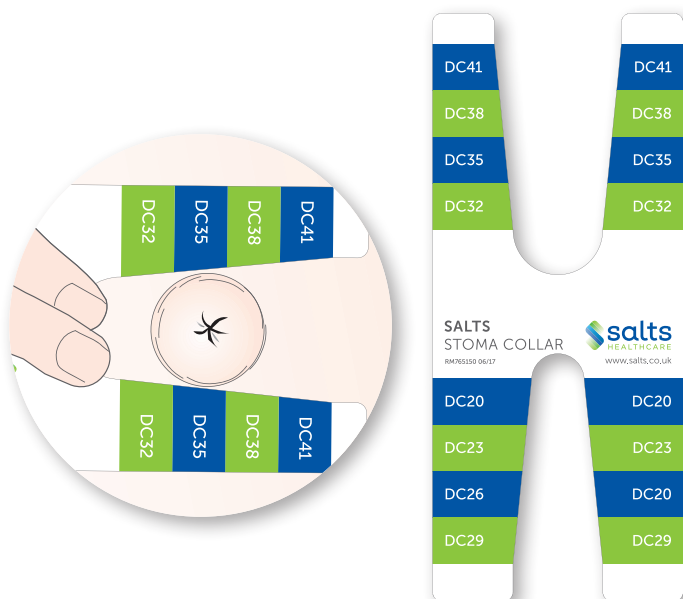

LÄTT ATT ANVÄNDA

Det finns olika sätt att kombinera Salts Stoma Collar med stomibandaget. På nästa sida finner du två olika sätt. Det är viktigt att prova sig fram tills du hittar en perfekt passform för din patient.

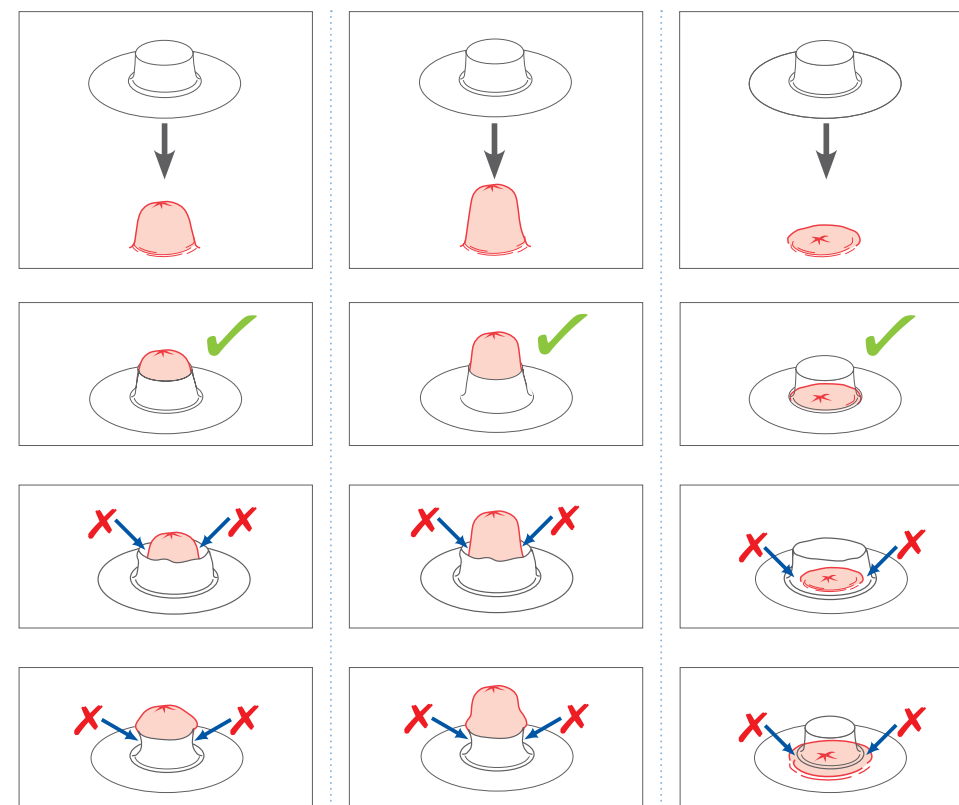

DET FINNS MER ÄN ETT SÄTT ATT SÄTTA SALTS STOMA COLLAR PÅ PLATS

METOD 1

(för 1- and 2-delsanvändare)

Ta bort skyddsfilmen och fäst Salts Stoma Collar runt stomin. Sätt sedan stomipåsen ovanpå.



METOD 2

(för 1-delsanvändare)

Fäst Salts Stoma Collar på plattans baksida. Ta sedan av skyddsfilmen och sätt hela stomibandaget runt stomin.



METOD 2

(för 2-delsanvändare)

Fäst Salts Stoma Collar på plattans baksida. Ta sedan av skyddsfilmen, sätt stomikragen + plattan runt stomin och fäst slutligen påsen ovanpå.



VILKEN METOD SOM ÄN ANVÄNDS, SÅ FÖLJER SALTS STOMA COLLAR MED STOMIBANDAGET NÄR DET TAS BORT.

10 -ÅRIG POJKE – ÖKAD ANVÄNDNINGSTID

FALLSTUDIE:

Salts Stoma Collar kan öka användningstiden av stomibandage, men även stärka självförtroendet hos barn som går i skolan.

PATIENT:

10-årig pojke. Storbritannien.

TYP AV STOMI:

Ileostomi till följd av Hirschsprungs sjukdom.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:

Hirschsprungs sjukdom är ett medfött tillstånd som innebär att tjocktarmen saknar nervceller vilket i sin tur förhindrar normal peristaltik och därmed kräver att det drabbade området av tarmen opereras bort.

Denna patient diagnostiserades med Hirschsprungs sjukdom i hela tjocktarmen och följaktligen opererades hans tjocktarm bort. Han har tidigare haft stomi, både som spädbarn och som 3-åring, vilka båda blev

nedlagda, samt en tredje stomi på grund av kraftig tunntarmsutvidgning 2004. År 2007 genomgick pojken en operation för sitt korttarmssyndrom i syfte att förlänga tarmytan och sedan kunna lägga ner stomin. Men då han ännu inte har velat göra någon ytterligare operation, har han de senaste fyra åren haft en ileostomi.

Pojkens ileostomi har höga flöden, och ibland kunde han tömma upp till 10 gånger per dag. Då läckage ofta uppstod innebar det att han förbrukade upp till 13 påsar per dag. Detta skapade en svår situation i både skolan och på fritiden.

MED SALTS STOMA COLLAR:

Efter att ha provat många olika produkter och hjälpmedel för att förhindra läckage, testade pojkens stomiterapeut Salts Stoma Collar när den kom till marknaden i hopp om att denna krage skulle vara lösningen.

RESULTAT:


Användningen av Salts Stoma Collar har förbättrat pojkens livskvalitet avsevärt. Numera använder han max två påsar per dag, och ibland kan till och med en och samma påse användas i hela 24 timmar. Salts Stoma Collar fungerar så pass bra att föräldrarna ibland måste påminna pojken om att tömma sin påse eftersom att han själv glömmer bort att han har den.

Pojken kan numera delta i skolans aktiviteter, och vågar sova borta hos kompisar. Han har till och med badat för första gången.

FÖRÄLDRARNAS REAKTION:

Pojkens mamma har beskrivit resultaten såhär:

“Salts Stoma Collar har förändrat våra liv. Utan den skulle vår son fortfarande ha problem med läckage.”

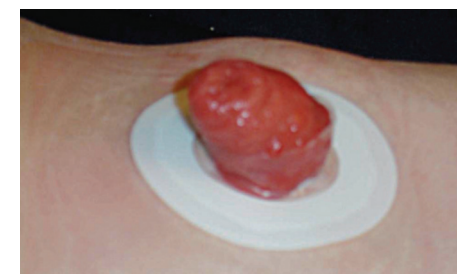

2 -ÅRIG POJKE – FÖRBÄTTRAD ANVÄNDNINGSTID

FALLSTUDIE:

Salts Stoma Collar kan även användas till mindre barn för att förhindra läckage och därmed göra det möjligt för dem att lära sig att leva ett normalt liv.

PATIENT:

2-årig pojke. Storbritannien.

TYP AV STOMI:

Ileostomi till följd av intestinal pseudo-obstruktion vid tre månaders ålder.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:

Pojken som fick en ileostomi vid tre månaders ålder drog ofta i stomipåsen på grund av den unga åldern. Detta resulterade i läckage och att påsen därför behövde bytas oftare, samt att huden runt stomin blev sårig.

BEHANDLING:

På grund av att huden runt stomin blev sårig, kontaktade föräldrarna pojkens stomiterapeut som föreslog Salts Stoma Collar för att skydda den peristomala huden.

EFTER SALTS STOMA COLLAR:

Efter regelbunden användning av Salts Stoma Collar är huden runt stomin helt återställd och pojken kan använda samma påse i upp till 48 timmar.

FÖRÄLDRARNAS REAKTION:

Föräldrarna berättar att Salts Stoma Collar har underlättat skötseln av pojkens stomi.

Stomikragen är klar att använda direkt vilket gör att stomibandaget enkelt och snabbt byts och deras son får mer tid att leka med sina kompisar.



UROSTOMI – ÖKAD ANVÄNDNINGSTID

FALLSTUDIE:

Även vid låga stomier i hudplan, kan Salts Stoma Collar fungera som en perfekt krage för att lösa problem med läckage och sårig hud.

PATIENT:

67-årig kvinna.

TYP AV STOMI:

Låg urostomi i hudplan.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:





Kvinnan opererades 2003 och har sedan dess haft sin urostomi. Då stomin blev mycket låg, i nivå med huden som bild 1 visar, innebar det svårigheter att hitta ett stomibandage som inte läckte. Läckage gjorde att patienten blev tvungen att byta påse två till tre gånger per dag. Huden runt stomin blev röd och sårig som ett resultat av detta.

BEHANDLING:

Kvinnan provade Salts Stoma Collar och använde sig av **metod 1** för att sätta stomikragen på plats, se bild 2. Cirka 1 mm marginal lämnades runt stomin för att det skulle finnas utrymme om stomin expanderade, se bild 3. Bild 4 visar när en konvex stomipåse sedan har placerats ovanpå.

RESULTAT:

Salts Stoma Collar hjälpte kvinnan att bli fri från urinläckage, vilket förbättrade hennes livskvalitet. Påsen byts numera varannan dag och hennes självförtroende har ökat avsevärt.

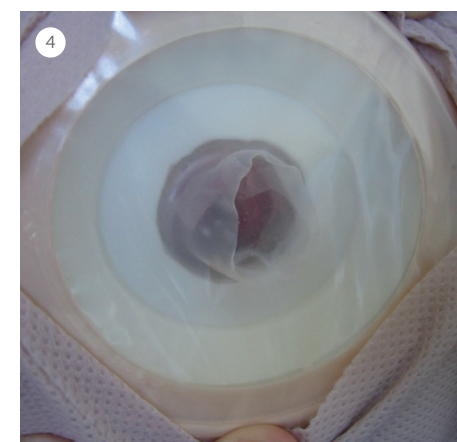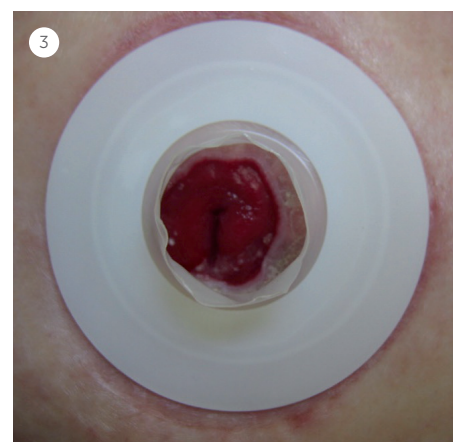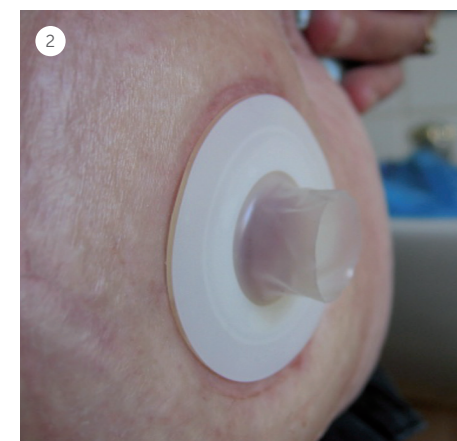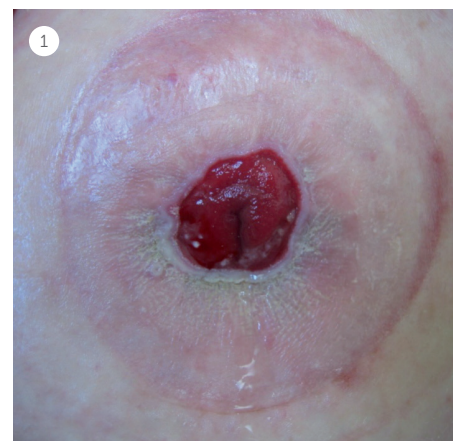

STOMIKOMPLIKATIONER – ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE

FALLSTUDIE:

Salts Stoma Collar förebygger skador på stomins ömtåliga slemhinna eftersom att Alphathane® materialet i kragen är så tunt och flexibelt att det hela tiden mjukt omsluter stomin. Det är därför ingen risk att kragen stramar åt kring stomin.

PATIENT:

60-årig man. Sydvästra Storbritannien.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:

Mannens stomi har reopererats tre gånger och flyttats två gånger. Han har även lidit av flertalet stopp i tarmen på grund av bräck och stenosis. Patienten upplevde även ett flertal läckage av avföring under stomibandaget varje vecka.



PRODUKTER:

Patienten använde sig av stomipasta för att skapa en plan yta, Salts Stoma Collar, en mjuk konvex påse och ett bälte.

RESULTAT:

Efter att mannen började använda Salts Stoma Collar har läckageproblemen upphört. Eftersom att han numera kan ha samma påse i mellan 24 till 48 timmar, har även hans självförtroende förbättrats. Den peristomala huden ser irriterad ut, men är inte öm.

- ① Visar hur stomin pekar åt sidan.
② Bild från sidan med Salts Stoma Collar.
③ Salts Stoma Collar med ett litet snitt för att möjliggöra ett fritt flöde av avföring till påsen. ④ och ⑤ Salts Stoma Collar är på plats. ⑥ Huden runt stomin har läkt.

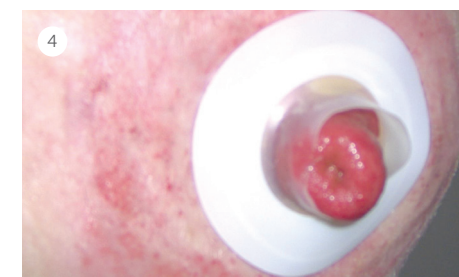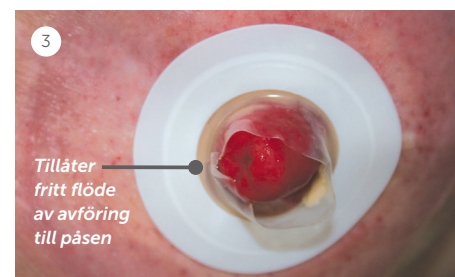

STOMIKOMPLIKATIONER – ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE

FALLSTUDIE:

När det kommer till loopstomier är det viktigt att se till att den distala delen av stomin inte täckas av hydrokolloiden på Salts Stoma Collar.

PATIENT:

64-årig man. Australien.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:

Mannen genomgick en ultralåg anteriorresektion med loopileostomi på grund av rektalcancer.

Direkt efter operationen fungerade stomiskötseln väl och mannen upplevde inga problem med sitt stomibandage eller den peristomala huden.

Efter den andra omgången av cellgifts-behandling började han däremot uppleva problem med sin stomi till följd av måttligt svår mukositis. Han remitterades därför till sin stomiterapeut för att undersökas och sedan vidare till onkologen.

Vid undersökningen visade det sig att mannens avföring var grötlik i konsistensen. Hans stomi var ödematös 2 cm hög på den

proximala tarmen. På grund av inflammationen i slemhinnan hade stomin lätt för att börja blöda. Då blodflödet var svårt att stoppa blev det mer eller mindre omöjligt att byta påse och det stora blodflödet orsakade läckage nästan omedelbart. För att öka tryggheten och bli fri från läckage provade mannen både 1- och 2-delsbandage innan besöket hos stomiterapeuten. Den peristomala huden var i gott skick och magen var platt så det gick att använda en plan platta. Höjden på stomin ändrades inte på grund av de peristaltiska rörelserna.

ANLEDNINGAR TILL ATT SALTS STOMA COLLAR ANVÄNDES:

Det fanns två anledningar till att Salts Stoma Collar rekommenderades till mannen: först och främst, den mjuka kragen skyddar den känsliga slemhinnan från att skadas vid byte av stomibandage, vilket minskar risken för blödningar.

Vidare, eftersom att basen på Salts Stoma Collar är gjord av hudvänlig hydrokolloid så var det möjligt att klippa hålet i plattan lite

större. På så vis minskade det risken för ytterligare trauma på stomislemhinnan vid applicering av stomibandaget.

RESULTAT:

Mannen kan nu använda samma stomibandage i upp till 72 timmar, istället för endast 24 timmar som tidigare var max. Salts Stoma Collar minskade även risken för skador på stomins slemhinna och blödningar som följd tack vare minskat antal byten av stomibandage. Samtidigt skyddades den peristomala huden.

Användningen av Salts Stoma Collar minskade risken för skador på stomins slemhinna och blödningar som följd tack vare minskat antal byten av stomibandage.



STOMIKOMPLIKATIONER – ÖKAD ANVÄNDNINGSTID

FALLSTUDIE:

Salts Stoma Collar har visat sig vara den perfekta lösningen om du lider av problem såsom smärta, irritation eller sårig hud.

PATIENT:

34-årig man, mekaniker, aktiv. Storbritannien.

TYPE OF STOMA:

Initiellt diagnostiserad med ulcerös kolit, gjorde en kolektomi och ileostomi för åtta år sedan.

Bäckenreservoar för sex år sedan.

Nedläggning av ileostomin för fem år sedan.

För tre år sedan fick han en loop-ileostomi till följd av fistelproblematik.

Efter det konverterades loop-ileostomin till en endstomi.

Mannen är nu under utredning för att eventuellt diagnostiseras med Crohn's sjukdom.

TIDIGARE PRODUKTER:

2-delsanvändare med en mjuk konvex platta. Huden runt stomin var sårig vilket orsakade kraftiga smärtor och gjorde att mannen hade svårt att böja sig ner. Med stomiterapeutens hjälp provade mannen att byta till en annan mjuk konvex platta vilket gjorde att majoriteten av smärtorna lindrades. Problemen med sårig och öm hud runt stomin kvarstod dock.

Mannen använde sig av puder vilket förbättrade situationen något. Samma platta kunde användas i högst 1–2 dagar, men till följd av sitt sociala och aktiva liv ville han slippa byta så ofta. Han önskade även att börja använda ett icke konvext stomibandage.

Slutligen drabbades mannen också av granulom på stomin vilka blödde lätt.

LÖSNING:

Mannen provade Salts Stoma Collar och användningstiden ökade till fyra dagar. Det har även hänt att han har kunnat ha samma platta i hela sju dagar utan att huden blivit irriterad.



Efter två dagar försvann smärtan och det såriga området under plattan. Istället för att byta platta redan efter ett par dagar på grund av att huden är irriterad, byter han numera platta när han känner för det.

Mannen slutade använda en konvex platta och har nu istället gått över till en plan platta.

Han har mindre granulom som blöder och han känner sig i allmänhet gladare. Smärtorna har försvunnit och tiden som han kan ha samma stomibandage har fördubblats.

Smärtorna har försvunnit och användningstiden har fördubblats.

HUDEN EFTER 4 VECKOR:

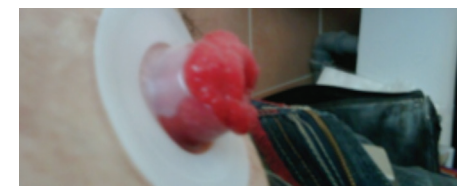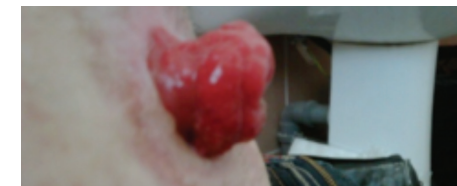

SALTS STOMA COLLAR (DERMACOL®)



Den unika stomikragen bildar en läckagefri barriär vid stomins bas och hindrar uttömning att komma i kontakt med den känsliga huden runt stomin. Den kan också bidra till att utgöra ett stöd och forma stomin till en tydligare "knopp." Kragen på Stoma Collar är mycket tunn och flexibel. Den följer kroppens alla rörelser men är hela tiden mjukt omsluten runt stomin.



SALTS STOMA COLLAR (DERMACOL®)

STORLEK PÅ STOMIN	ANTAL	PRODUKTKOD	VARUNR
17,5 mm–20 mm	30	DC20	732130
20,5 mm–23 mm	30	DC23	220499
23,5 mm–26 mm	30	DC26	220500
26,5 mm–29 mm	30	DC29	220501
29,5 mm–32 mm	30	DC32	220502
32,5 mm–35 mm	30	DC35	220503
35,5 mm–38 mm	30	DC38	220504
38,5 mm–41 mm	30	DC41	732132

SALTS STOMIPASTA

Stomipasta kan användas för att fylla ut ojämnheter eller som tätning vid läckageproblem. Stomipastan är lätt att hantera och torkar på cirka 30 sekunder.



SALTS FLANGE EXTENDER (SECUPLAST® HYDRO MED ALOE VERA OCH SECUPLAST® HYDRO)



Salts Flange Extender

(SecuPlast® Hydro med Aloe Vera)

Ibland behövs förstärkning runt plattans kanter. Salts Flange Extender (SecuPlast® Hydro med Aloe Vera) kan erbjuda en enkel och effektiv lösning. De tunna och mycket hudvänliga remsorna av hydrokolloid är lätta att använda och kan ge ökad säkerhet och trygghet. Aloe Vera kan återfukta huden.

Salts Flange Extender (SecuPlast® Hydro)

Tunna och smidiga remsor av hydrokolloid kan förstärka plattans kanter och bidra till att förlänga bandagets användningstid.



SALTS FLANGE EXTENDER (SECUPLAST® HYDRO MED ALOE VERA)

BESKRIVNING	ANTAL	PRODUKTKOD	VARUNR
Längd: 122 mm, Bredd: 33 mm, Tjocklek: 0,6 mm	30	SPA2	730968

SALTS FLANGE EXTENDER (SECUPLAST® HYDRO)

BESKRIVNING	ANTAL	PRODUKTKOD	VARUNR
Längd: 122 mm, Bredd: 33 mm, Tjocklek: 0,6 mm	30	SPH1	204923

SALTS STOMIPASTA

BESKRIVNING	ANTAL	PRODUKTKOD	VARUNR
Stomipasta	60 g	SP60	280768



Hudvård för stomiopererade

Hel och oskadad hud är en förutsättning för okomplicerad bandagering av en stomi. Salts Healthcare är stolta över att vara den första tillverkaren av stomibandage som ackrediterats av British Skin Foundation, för sin forskning och utveckling av hudvänliga stomiplattor. Salts Healthcare kan med glädje meddela att deras sortiment av stomiprodukter är det första som erhåller ytterligare en försäkran om hudvänlighet, nämligen "Dermatologically Accredited"-stämpeln från Skin Health Alliance.

Ett särskilt stort tack går till alla patienter och stomiterapeuter som deltagit. Prova Salts Stoma Collar på patienter som upplever problem med läckage, sårig hud runt stomin eller behöver stärka sitt självförtroende. *Salts Stoma Collar kan förändra deras liv.*

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller gratis prover:



046-29 24 00



kundservice@mcare.se



www.mcare.se



M Care



mcare.se



@SaltsHealthcare



SaltsHealthcare

RM765883 01/22



®Registered trade marks of Salts Healthcare Ltd. ©Salts Healthcare Ltd 2022. Products and trade marks of Salts Healthcare Ltd are protected by UK and foreign patents, registered designs and trade marks. For further details, please visit www.salts.co.uk